




Equipos  
Biomédicos  
Profesionales

# Línea Mobyliá

## Selladoras para Central de Esterilización

Selladora controlada por microprocesador con pantalla Touch screen para uso profesional en Centrales de Procesamiento esteril.

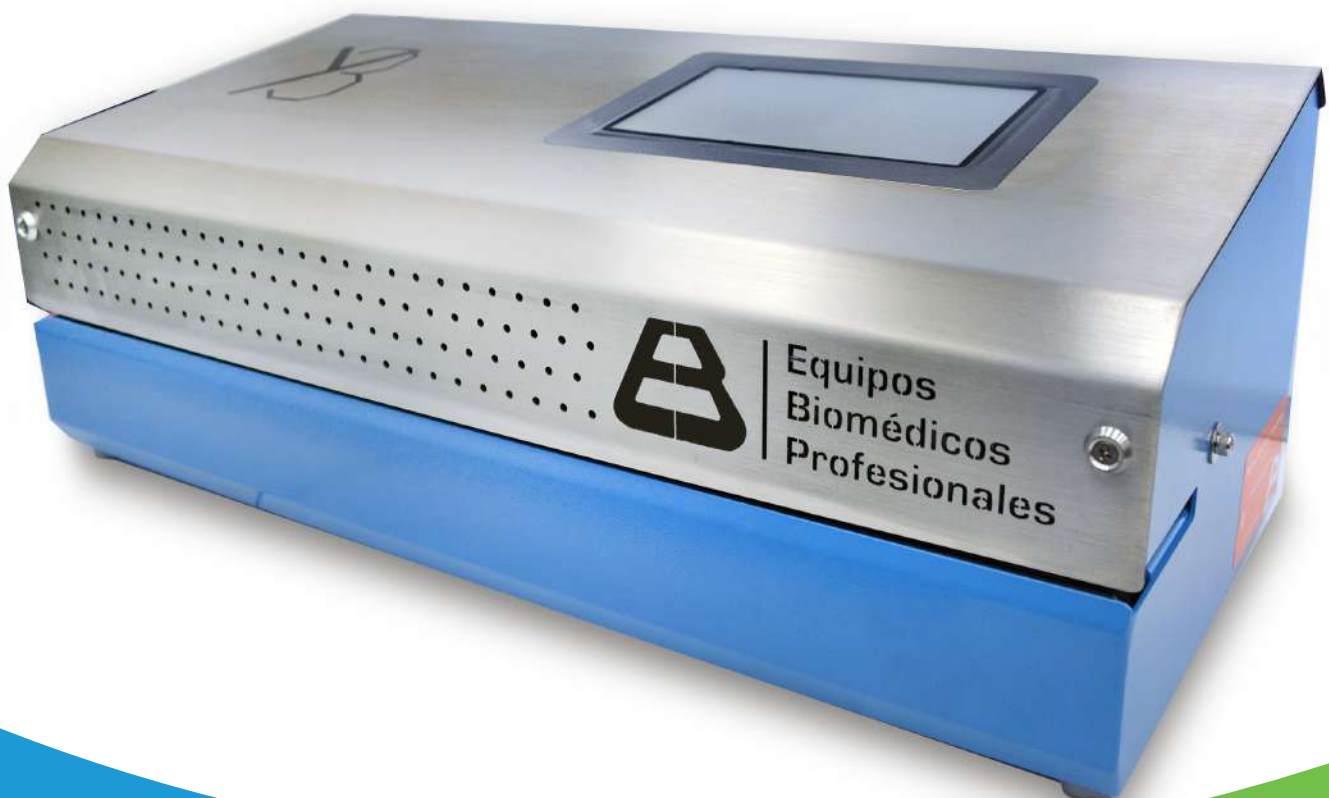



## Perfección en los detalles mas finos

Los tiempos mas cortos para calentado, garantizan procesos express de sellado Dimensiones compactas que permiten acoplarse a mesas de ensamble y supervisión EBP Pantalla intuitiva que facilita la operación.

EcoFriendly, permite programar el tiempo a Standby y disminuir los costos de operación

Evita errores de operación al ser operación intuitiva en su display touch screen Seguridad adicional con su sello de 14mm Fabricación conforme a ISO 1160-2 validable.

Las selladoras Y3 / Y5 de la serie Mobyilia esta diseñada para satisfacer las necesidades de las Centrales de Procesamiento Estéril con alto volumen de trabajo. La selladora garantiza el sellado eficiente de las bolsas.

El sistema de de transportación integrado por banda y rodillos permite el sellado de paquetes de gran volumen con precisión . La presión de sellado puede ser variable dependiendo del material.




# Proceso de sellado al más alto nivel.

El tiempo desde encendido hasta operación no rebasa los 2 minutos permitiendo la rápida operación sin pausas, Cuando la selladora pasa de standby a operación el tiempo es menor a 40 segundos.

El sellado de las bolsas es realizado en 14mm, lo que es una ventaja y permite garantizar la hermeticidad de la envoltura, aumentando el tiempo de vida en bodega y una vez que se requiera la facilidad de la apertura del mismo.



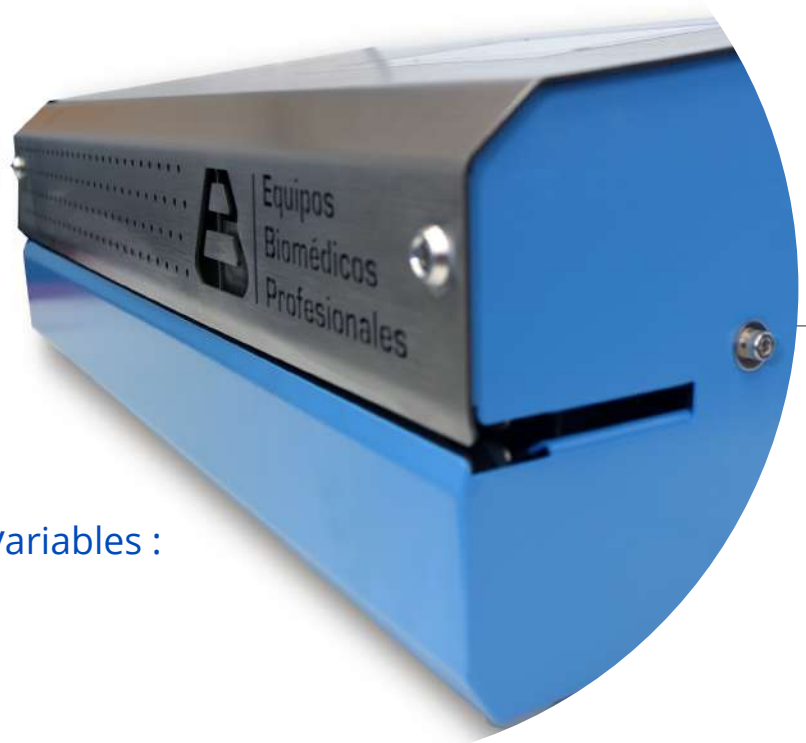

En el modelo Y5, el sistema de impresión es configurable en sus variables


Los parametros de sellado son variables :

- Presión
- Temperatura sellado
- Velocidad
- Tiempo a reposo
- Temperatura a reposo

y con esto una gran variedad y flexibilidad en el sellado de materiales como:

Bolsa con film termosellable

HDPE (Tyvek by Dupont) en 1059B,1073B y 2fs (el mas comun e imprimible)

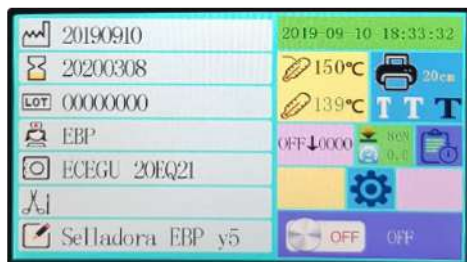

- Fecha /Hora
- Fecha de Elaboración
- Fecha de Caducidad
- Lote
- Nombre personal
- Nombre Esterilizador
- Instrumental Nombre
- Nota en General





## Única en eficiencia y seguridad

	Mobyliya Y3	Mobyliya Y5
Tipo de Selladora	Bandas / Rodillos	Bandas / Rodillos
Validable	Si	Si
Dimensiones	56 x 26 x 21 cm	56 x 26 x 21 cm
Peso	18 kg	18 kg
Alimentación eléctrica	110-127VAC 60Hz	110-127VAC 60Hz
Distancia de sellado de la orilla	0-35mm (0-1.2in)	0-35mm (0-1.2in)
Ancho de sellado	14 mm 9 mm	14 mm 9 mm
Largo de sellado	Ilimitado	Ilimitado
Velocidad de sellado	5-13 m/min ajustable	5-13 m/min ajustable
Temperatura de sellado	80-220 °C	80-220 °C
Tolerancia Temperatura	± 2 °C	± 2 °C
Impresión	--	Si

### Seguridad:

Las selladoras serie Mobyliya cumplen con los requerimientos para el proceso de validación conforme a ISO 11607-2. Al ser modificables los parámetros de temperatura , presión de contacto y velocidad de soldado en la banda transportadora, los cuales son continuamente monitoreados en el touch screen. La selladora automáticamente detiene el proceso en caso de que algún parámetro exceda los límites ,



Equipos  
Biomédicos  
Profesionales

[www.equipos-biomedicos.com](http://www.equipos-biomedicos.com)



Mar Caspio # 25  
Col. Popotla C.P 11400  
CDMX



(01 55) 53963260  
(01 55) 53963264  
(01 55) 53415887



[ventas@equipos-biomedicos.com.mx](mailto:ventas@equipos-biomedicos.com.mx)  
[contacto@equipos-biomedicos.com.mx](mailto:contacto@equipos-biomedicos.com.mx)

 Traceability  
Software Solutions

